

Schwangerschaftstest zur Eigenanwendung

Gebrauchsanleitung ist vor der Anwendung genau zu lesen. Test zum Einmalgebrauch.

Einleitung


dr.bosshammer-Test ist ein Schwangerschaftstest zur Bestimmung von HCG (Humanem Chorion-Gonadotropin) Konzentration zwecks Schwangerschaftsdiagnose im Urin.

Inhalt:

Die Testbox enthält einen Test eingeschweißt in einem Aluminiumbeutel mit Trockenmittelkissen und einen Beipackzettel.

Testprinzip:

dr.bosshammer-Test ist ein qualitativer Schnelltest zur Bestimmung von Humanem Chorion-Gonadotropin im Urin. In nur 5 Minuten kann die Bestimmung von HCG-Werten mit einer Empfindlichkeit von 10 mIU/ml erfolgen. Bei Nichtvorhandensein von HCG erscheint keine sichtbare Linie im Ergebnissfenster jedoch eine gefärbte Linie im Kontrollfenster.

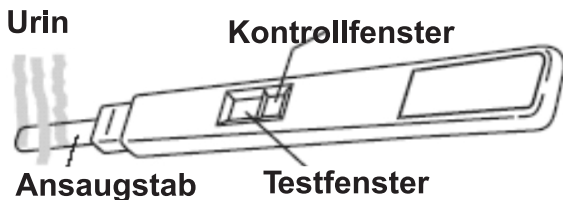

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Dieser Test ist ausschließlich für die In Vitro Diagnostik bestimmt. Nur für die äußerliche Anwendung! NICHT SCHLUCKEN!
2. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den Test durchführen. Das Testergebnis kann falsch sein, wenn die Anleitung nicht ordnungsgemäß beachtet wurde.
3. Lagern Sie den Test bei +4°C bis +30°C. Nicht einfrieren!
4. Nicht nach Ablauf des auf dem Aluminiumbeutel aufgedruckten Haltbarkeitsdatums verwenden oder wenn der Beutel beschädigt wurde.
5. dr.bosshammer-Test nach einmaligem Gebrauch nicht wieder verwenden.
6. Halten Sie den Test von Kindern fern
7. Entsorgen Sie den Test nach Gebrauch im Hausmüll

Testdurchführung:

1. Entnehmen Sie den Test aus dem Alubeutel. Das Kissen mit Trockenmittel entsorgen.
2. Die blaue Kappe des dr.bosshammer-Testes entfernen.
3. Halten Sie den Ansaugstab für ca. 5 bis 10 Sekunden direkt in den Urinstrahl (Abb. 1).
Wenn Sie es vorziehen, kann die Urinprobe auch in einem sauberen, trockenen, rückstandsfreien Becher gesammelt werden. Den Ansaugstab für mindestens 10 Sekunden in die Probe halten, so dass der Ansaugstab komplett vollgesogen ist. (Abb. 2)
Im Fall einer frühen Schwangerschaft sollte Morgenurin verwendet werden!

Abb.1



Abb. 2



4. Setzen Sie die blaue Kappe wieder auf den dr.bosshammer-Test.
5. Legen Sie den Test waagrecht mit den beiden "Fenstern" nach oben liegend auf eine gerade Fläche. Das Ergebnis wird im Fenster nach 5 Minuten angezeigt. Ergebnisauswertung nach 10 Minuten ist NICHT mehr möglich. Bei einer frühen Schwangerschaft sollten Sie erst nach genau 10 Minuten ablesen.

Ergebnisauswertung:

Warten Sie 5 Minuten bis zum Ablesen des Ergebnisses. Innerhalb von 5 Minuten wird eine Linie im kleineren Fenster (Kontrollfenster) erscheinen. Wenn diese Linie erscheint, können folgende Ergebnisse abgelesen werden:

POSITIVES ERGEBNIS = SCHWANGER



Zwei pink/rosafarbene Linien erscheinen - eine im Testfenster und eine im Kontrollfenster. Der Test ist positiv und zeigt an, dass eine Schwangerschaft vorliegt.

Hinweis: Eine Linie kann stärker/schwächer sein bzw. intensiver sein als die andere, jedoch immer pink/rosafarben. Wie auch immer - Sie sollten zwei klare parallele Linien sehen.

NEGATIVES ERGEBNIS: NICHT SCHWANGER



Nur eine pink/rosafarbene Linie erscheint im Kontrollfenster (kleineres Fenster) und *keine* Linie erscheint im Testfenster (größeres Fenster). Der Test ist negativ und es liegt keine Schwangerschaft vor.

UNBESTIMMTES ERGEBNIS



Der Test ist ergebnislos/ungültig, wenn keine Linie im Kontrollfenster erscheint oder nur eine Linie *im Testfenster* erscheint. Ist dies der Fall, dann sollte ein neuer dr.bosshammer Test nach 48 Stunden mit einer frischen Urinprobe gemacht werden.

Fragen und Antworten:

Wie funktioniert der dr.bosshammer Schwangerschaftsfrühtest

Wenn eine Frau schwanger ist, beginnt ihr Körper, ein Hormon mit der Bezeichnung HCG (Humanes Chorion-Gonadotropin) zu produzieren, welches mit der Zeit in steigender Konzentration im Urin ausgeschieden wird.

Das Grundprinzip dieses Tests beruht auf dem Nachweis dieser Hormonausscheidung.

Wann soll dieser Test durchgeführt werden?

Sie können den dr.bosshammer - Schwangerschaftstest zu jeder Tageszeit verwenden. **Allerdings ist bei einer frühen Schwangerschaft (8-10 Tage nach Empfängnis) unbedingt Morgenurin zu verwenden.**

Welches ist der beste Zeitpunkt, um den Test durchzuführen?

Am ersten Tag nach Ausbleiben der Regel.

Hat die Menge der Testflüssigkeit einen Einfluss auf das Ergebnis?

Eine korrekte Durchfeuchtung des Ansaugstabes und eine entsprechende Verdünnung der Reagenzien mit dem Urin ist notwendig, um das Hormon präzise nachzuweisen. Bei Befolgung der Anweisungen sind einwandfreie Ergebnisse zu erwarten.

Was ist, wenn ich denke, dass das Ergebnis nicht richtig ist?

Wenn Sie keine eindeutige/n Linie/n im Test/Kontrollfenster erkennen können, wiederholen Sie den Test nach 2-3 Tagen mit einem neuen dr.bosshammer - Schwangerschaftstest. Sollte das Resultat positiv sein, dann ist die Linie deutlich dunkler/kräftiger als beim vorherigen Test. Bei Befolgen der Anleitung sollten Sie auch ein akkurates Ergebniss erhalten.

Einige Medikamente die HCG beinhalten oder die in Kombination mit HCG (wie z.B. Pregnyl, Porfasi, Pergonal) und ungünstigen medizinischen Bedingungen eingenommen werden, können falsch positive Ergebnisse erzielen.

Alkohol, Analgetika, Antibiotika, Geburtskontrolltabletten, Hormon-Therapien, die clomiphenes Citrat (wie Clomid, Serophen) enthalten, sowie Schmerzstilller, sollten das Ergebnis nicht beeinflussen.

Der Test könnte ein falsch positives Ergebnis anzeigen, wenn Sie eine Fehlgeburt, Abtreibung oder eine Entbindung innerhalb der letzten 8 Wochen hatten. Der Test könnte, noch sich im Körper befindliches HCG der früheren Schwangerschaft, erkennen.

Was ist, wenn die Linie im Testfenster stärker ist als die im Kontrollfenster. Oder wenn diese heller ist als die Linie im Kontrollfenster?

Solange Sie eine pink/rosafarbene Linie im Testfenster sehen können, ist das Testergebnis positiv.

Ich habe den Ansaugstab über 10 Sekunden in den Urin gehalten. Kann ich trotzdem mit einem präzisen Ergebnis rechnen?

Ja, die Überschreitung von wenigen Sekunden hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.

Ich habe den Ansaugstab weniger als 5 Sekunden in den Urin gehalten. Kann ich trotzdem mit einem präzisen Ergebnis rechnen?

Nein, denn es besteht die Gefahr, dass zu wenig Volumen von der Probenflüssigkeit aufgesogen wurde und dadurch das Ergebnis ungültig sein kann.

Was mache ich, wenn das Ergebnis positiv ist?

Wenn das Ergebnis positiv ist, sollten Sie Ihren Gynäkologen kontaktieren. Eine Bestätigung dieses Schwangerschaftstests durch den Gynäkologen ist wichtig, um die Gesundheit für Sie und Ihr Kind zu sichern.

Was mache ich, wenn das Ergebnis negativ ist?

Wenn das Ergebnis negativ ist, ist ein Nachweis des Hormons HCG nicht zu führen (der Test kann HCG - Konzentrationen ab 10 mIU/mL nachweisen) und dieses bedeutet, Sie sind nicht schwanger.

Wenn Ihre Regel nicht binnen einer Woche auftritt, sollten Sie den Schwangerschaftstest wiederholen. Wenn das Ergebnis wiederum negativ ist und wenn die Regel auch dann noch nicht aufgetreten ist, sollten Sie Ihren Gynäkologen kontaktieren. Es können dann andere Gründe vorliegen, die Ihr Gynäkologe mit Ihnen besprechen wird.

Was passiert, wenn ich die vollen 5 Minuten zum Ablezen des Tests nicht einhalte?

Wenn Sie das Ergebnis vor den 5 Minuten ablesen, hat der Test nicht genügend Reaktionszeit und das Ergebnis könnte unkorrekt sein. Das Erscheinen einer pink/rosafarbenen Linie im Kontrollfenster zeigt Ihnen an, dass der Test zu Ende ist und Sie das Ergebnis ablesen können.

Wichtig: Ergebnisse, die später als 10 Minuten nach Aufsaugen des Urins abgelesen werden, sind nicht verwertbar!

Wie zuverlässig ist der dr. bosshammer Schwangerschaftstest?

Die Evaluationsberichte zeigen bei Referenzverfahren, dass der dr. bosshammer Schwangerschaftstest eine Sicherheit bzw. Zuverlässigkeit von mind. 99% aufweist.


Hersteller:

VEDA.LAB, ZAT du Londeau, Rue de l'Expansion, Cerisé, BP 181, 61006 Alençon cedex - France

Vertrieb und Service in Deutschland:

dr.bosshammer Pharma GmbH
Bachweg 6, D-35398 Gießen,
Tel. 0641 / 98 41 99-0, Fax 0641 /98 41 99-11
info@bosshammer.com

Bedeutung der Symbole

	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis
	Lagerung bei +4°C / +30°C
	Nur zum Einmalgebrauch
	In-Vitro-Diagnostikum
	Gebrauchsanleitung beachten
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 98/79/CE (IVDD).
	Katalognummer