

Granulox®

Hämoglobin-Spray



Kurzanleitung

Bitte vollständigen
Beipackzettel beachten.



1. Wundreinigung

- ✓ Granudacyn®, SastoMed
- ✓ Kochsalz- oder Ringerlösung
diverse Hersteller
- ✓ Polyhexanid, z.B.:
Serasept®, Lavasorb®, Lavanid®
- ✓ Octenidinihydrochlorid, z.B.:
Octenisept®, Octenilin®
(nachträglich spülen mit
Kochsalz- oder Ringerlösung)



2. Granulox gleichmäßig aus 5 - 10 cm aufsprühen. Sprühkopf verklebt? Abziehen und ersetzen oder neuen bestellen.



3. Abdecken mit atmungsaktiver Wundauflage (s. Rückseite).

Empfohlene Wundauflagen:

✓ **Hydropolymerverbände/Schaumverbände, z.B.:**

Kliniderm, SastoMed; Tegaderm™Foam, 3M; Mepilex®, Mölnlycke; Draco Foam, DRACO®; Allevyn®, Smith&Nephew; Cutimed® Sorbact®, BSN; , UrgoCell, Urgo; Hydro Tac®, Hartmann; Suprasorb®P, Lohmann&Rauscher; Biatain®, Coloplast

Distanzgitter, z.B.:

UrgoTül, Urgo; Mepitel® One, Mölnlycke

Superabsorber/Hydrofasern, z.B.:

Aquacel®, ConvaTec; Vliwasorb®, Lohmann&Rauscher; Sorbion Sachet S, Sorbion

✓ **Hydrogele, z.B.:**

Granudacyn® Wundgel, SastoMed; NU-GEL®, Systagenix; UrgoHydrogel, Urgo; Intrasite Gel, Smith&Nephew; Hydrosorb® Gel, Hartmann; Purilon®, Coloplast

Folienverbände, z.B.:

Tegaderm™ Film, 3M; OPSITE® Flexifix, Smith&Nephew

Alginate, z.B.:

Sorbalgon®, Hartmann; Trionic®, Systagenix; Melgisorb®, Mölnlycke; Cutimed®Alginate, BSN; Kaltostat®, ConvaTec; Biatain® Alginate, Coloplast; Suprasorb® A, Lohmann&Rauscher

✗ **Hydrokolloid-Verbände/Okklusive Filmverbände/VAC-Systeme**

Lagerung: • Längere Standzeiten: Kühlschrank, 2°C – 8°C
• An Anwendungstagen: Raumtemperatur, max. 25°C. Bei täglicher Verwendung auch dauerhaft – bis zu 6 Wochen.

Service- und Bestellhotline: 05401 36519-10

Fax: 05401 36519-18, E-Mail: service@sastomed.de